

EVOLUTION

POSITIONERINGSKUSSEN

Positioneringskussen Gebruiksaanwijzing

HOOFD – BLADZIJDE 3					
BEDEKKING		ACHTERHOOFD PLAATSERS			
REF	CSHP12	REF	SHP12	Klein	Stijl 1
REF	CSHP14	REF	SHP14	Groot	Stijl 1
REF	CSHP23	REF	SHP23	Gemiddeld	Stijl 2
REF	CSHP24	REF	SHP24	Groot	Stijl 2

ARM – BLADZIJDE 4		
ARM POSITIONNERINGSKUSSEN		
REF	SAP14	GROOT
REF	SAP13	GEMIDDELD
RIEM EN FIXATIEKIT		
REF	SRK14	GROOT

TORSO – BLADZIJDE 5			
POSITIONNERINGSKUSSEN TORSO			
REF	STPL14	GROOT	LINKS
REF	STPR14	GROOT	RECHTS

KNIE EN VOET – BLADZIJDE 6			
POSITIONNERINGSKUSSEN VOET			
REF	SFPL14	GROOT	LINKS
REF	SFPR14	GROOT	RECHTS
REF	SFPP13	GEMIDDELD	UNIVERSEEL
POSITIONNERINGSKUSSEN KNIE			
REF	SKPP14	GROOT	UNIVERSEEL
REF	SKPP13	GEMIDDELD	UNIVERSEEL

PRE-OPERATOIR	
BLADZIJDE	AFBEELDINGEN
2	② INSPECTEREN VOOR GEBRUIK
	② TE GEBRUIKEN OP DROOG OPPERVLAKTE
	② DROOG HOUDEN
	② VERKEERD GEBRUIK 1. Bij twijfel 2. Verwijderen
	② DE LEDEMATEN NIET TE STRAK VASTMAKEN
	② VOORKOM OVERDREVEN STRESS

HOOFD	
BLADZIJDE	AFBEELDINGEN
3	② GEBRUIK GEEN BESCHADIGDE COVERS
	② PRODUCT INFORMATIE
	② DROOG HOUDEN
	② OPENING NIET OVERDEKKEN
	② VERKEERD GEBRUIK VAN HET PRODUCT

Dutch

ARM	
BLADZIJDE	AFBEELDINGEN
4	2 ARM POSITIONNERINGSKUSSEN
	2 PATIËNT LENGTE&GEWICHTGRENZEN
	2 PRODUCT INFORMATIE
	2 ELLEBOOG
	2 RIEM VOOR ARM SUPPORT
	2 UNIVERSEEL
	2 VERKEERD GEBRUIK VAN HET PRODUCT
	2 BEVESTIGEN

TORSO	
BLADZIJDE	AFBEELDINGEN
5	2 POSITIONNERINGSKUSSEN TORSO LINKS / RECHTS
	2 PATIËNT LENGTE&GEWICHTGRENZEN
	2 PRODUCT INFORMATIE
	2 VERKEERD GEBRUIK VAN HET PRODUCT

KNIE EN VOET	
BLADZIJDE	AFBEELDINGEN
6	2 POSITIONNERINGSKUSSEN KNIE EN VOET
	2 PRODUCT INFORMATIE
	2 SAMEN GEBRUIKEN
	2 VERKEERD GEBRUIK VAN HET PRODUCT
	2 UNIVERSEEL

TIJDENSOPERATIE	
BLADZIJDE	AFBEELDINGEN
7	2 NIET GEBRUIKEN BIJ DE CHIRURGISCHE SITE
	2 WRIJVING VERMIJDEN
	2 VERMIJD DE OPHOPING VAN VOCHT
	2 OEDEEM CONTROLE
	2 VERMIJD ALGEMENE ELECTRO-STATISCHE CHARGE
	2 MONITOR COVER

NA DE OPERATIE	
BLADZIJDE	AFBEELDINGEN
8	2 ZIEKENHUIS UITRUSTING SCHOONMAAK-/ONTSMETTINGSPROCEDURE
	2 ACTIEVE BESTANDDEEL <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Natriumhyochloride <input type="checkbox"/> Natriumchloride <input type="checkbox"/> Propan-1-ol (alcohol doekjes) <input type="checkbox"/> Natrium dichloroisoyanurate
	GEBRUIK AANBEVOLEN ONTSMETTINGSMIDDEL
	2 STANDAARD REINIGINGSMIDDEL
	2 WEKEN IN ONTSMETTINGSMIDDEL
	2 STERILISATIE GAS
	2 INSPECTIE NA GEBRUIK
	2 VLEKKEN VAN ONTSMETTINGSMIDDEL OK
	2 EINDE VAN PRODUKT GEBRUIK <ul style="list-style-type: none"> Misvormd Gebarsten Gescheurd
	2 NIET GELEIDEND

	② PLAIN FILM X-RAY, CT SCAN
	② OPSLAG
	② IN VOORRAAD HOUDEN

BLADZIJDE 10: ELK SERIEUS INCIDENT MET RELATIE TOT DIT PRODUCT DIENST GEMELD TE WORDEN AAN DE FABRIKANT EN AAN DE BEVOEGDE AUTORITEIT IN HET LAND WAAR U GEVESTIGD BENT.