

EVOLUTION

POSITIONNEURS PATIENT

Mode d'emploi pour utilisation en position dorsale

TÊTE – PAGE 3					
HOUSSES			CALE-TÊTE		
REF	CSHP12	REF	SHP12	Petit	Modèle 1
REF	CSHP14	REF	SHP14	Grand	Modèle 1
REF	CSHP23	REF	SHP23	Moyen	Modèle 2
REF	CSHP24	REF	SHP24	Grand	Modèle 2

BRAS – PAGE 4		
COUSSIN DE POSITIONNEMENT POUR BRAS		
REF	SAP14	Grand
REF	SAP13	Moyen
SANGLE ET SYSTÈME DE FIXATION		
REF	SRK14	Grand

TORSE - PAGE 5			
COUSSIN DE POSITIONNEMENT POUR TORSE			
REF	STPL14	GAUCHE	Grand
REF	STPR14	DROITE	Grand

GENOU ET PIED – PAGE 6			
COUSSIN DE POSITIONNEMENT POUR PIED			
REF	SFPL14	Grand	GAUCHE
REF	SFPR14	Grand	DROITE
REF	SFPP13	Moyen	Universel
COUSSIN DE POSITIONNEMENT POUR GENOU			
REF	SKPP14	Grand	Universel
REF	SKPP13	Moyen	Universel

PRÉ-OPÉRATEUR	
Page	Image
2	② INSPECTION AVANT USAGE
	② UTILISATION SUR SURFACE SÈCHE
	② GARDER SEC
	② UTILISATION INADÉQUATE 1. Doute 2. Retirer
	② PAS SERRER TROP FORT LES MEMBRES
	② ÉVITER LES POSITIONNEMENTS DE STRESS EXAGÉRÉS

TÊTE	
Page	Image
3	② NE PAS UTILISER DES HOUSSES ENDOMMAGÉES
	② INFORMATION DU PRODUIT
	② GARDER SEC
	② NE PAS COUVRIR L'OUVERTURE
	② MAUVAISE UTILISATION DU PRODUIT

French	
BRAS	
Page	Image
4	② COUSSIN DE POSITIONNEMENT POUR BRAS
	② LIMITE DU POIDS ETHAUTEUR D'UN PATIENT
	② INFORMATION DU PRODUIT
	② COUDE
	② SANGLE POUR SUPPORT BRAS
	② UNIVERSEL
	② MAUVAISE UTILISATION DU PRODUIT
	② FIXER

TORSE	
Page	Image
5	② COUSSIN DE POSITIONNEMENT POUR TORSE DROITE / GAUCHE
	② LIMITE DU POIDS ETHAUTEUR D'UN PATIENT
	② INFORMATION DU PRODUIT
	② MAUVAISE UTILISATION DU PRODUIT

GENOU ET PIED	
Page	Image
6	② COUSSIN DE POSITIONNEMENT POUR GENOUX ET PIEDS DROITE / GAUCHE
	② INFORMATION DU PRODUIT
	② À UTILISER ENSEMBLE
	② MAUVAISE UTILISATION DU PRODUIT
	② UNIVERSEL

LORS DE L'OPERATION	
Page	Image
7	② NE PAS UTILISER AU NIVEAU DU SITE OPÉRATOIRE
	② EVITER LES FROTTEMENTS
	② EVITER LES FLUIDES
	② SURVEILLANCE DES OEDÈMES
	② EVITER DÉCHARGES ELECTRO-STATIQUES
	② CONTRÔLER LA COUVERTURE

POST-OP	
Page	Image
8	② PROCÉDURE DE NETTOYAGE ET DE DÉSINFECTATION STANDARD
	② AGENTS ACTIFS <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Hypochlorite de sodium <input type="checkbox"/> Chlorure de sodium <input type="checkbox"/> Propanol (nettoyage à l'alcool) <input type="checkbox"/> Dichloroisocyanurate de Sodium
	DÉSINFECTANTS RECOMMANDÉS
	② DÉTERGENTS STANDARDS
	② IMMERSION DANS UN DÉSINFECTANT
	② Stérilisation au GAZ

	② INSPECTER AVANT UTILISATION
	② DÉCOLORATION DUE AU DÉSINFECTANT OK
	② FIN DE VIE DU PRODUIT Déformé Déchiré Tordu
	② NON CONDUCTEUR
	② FILM DE LA PLAINE DE RAYONS X, SCAN CT
	② STOCKAGE
	② STOCKER

Page 10: TOUT INCIDENT RELATIF A L'UTILISATION DE CE DISPOSITIF DOIT ETRE DECLARE AUPRES DU FABRICANT ET AUPRES DE L'AUTORITE NATIONALE COMPETENTE.